


# ThruScan®

## Termal Tarama Modülü


### Kullanma Kılavuzu

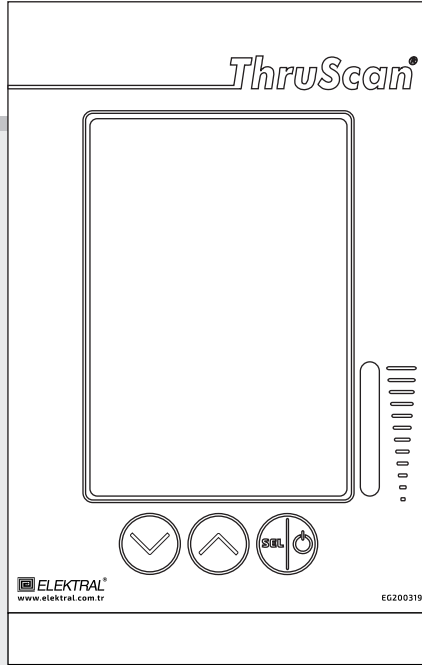

Elektral Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.  
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
M. Kemal Atatürk Bulvarı 23  
35620 - İzmir / TURKEY  
Telefon : + (90) 232 376 7300  
Fax: + (90) 232 376 7030  
E-Mail: [elektral@elektral.com.tr](mailto:elektral@elektral.com.tr)

## **Çalışması İçin Gereken Nominal Koşullar**


- 1.** TSM' nin taradığı alanın en az 5m' lik uzaklığında herhangi bir yansıtıcı yüzey bulunmamalıdır.
- 2.** TSM doğrudan gün ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- 3.** TSM güneş ışıklarının geldiği yerlere doğrudan bakmamalıdır.
- 4.** TSM' nin taraması yapılırken cihazın önünden her seferinde 1(bir) kişi geçmelidir.
- 5.** TSM alın sıcaklığını okuduğundan dolayı kişilerin alnını kapatacak şapka, bere gibi kıyafetler olmamalıdır.
- 6.** Oda sıcaklığında 25 derecede çalıştırılması tavsiye edilir.

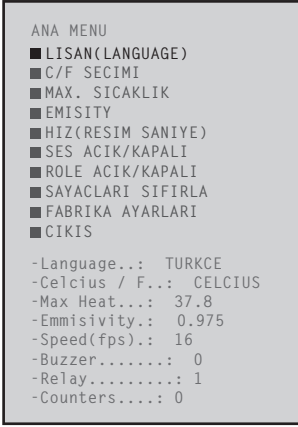


**ANA MENÜ'** ye giriş yapmak için **'SEL'** tuşuna uzun basın.

Ana menüde gezinmek için yön tuşlarını, seçim yapmak için **'SEL'** tuşunu kullanın.


Şifre: 000

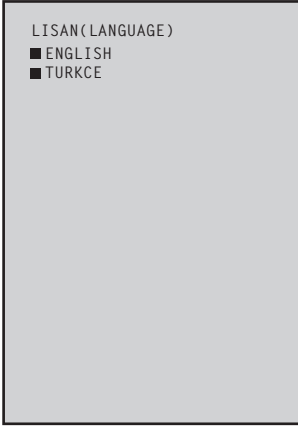


**LİSAN** kısmında, cihazın dil seçimi yapılır.

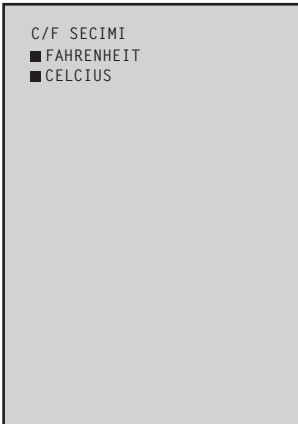

**C / F SEÇİMİ** kısmında, ölçülen sıcaklığın derece cinsinden birimi ayarlanabilir.

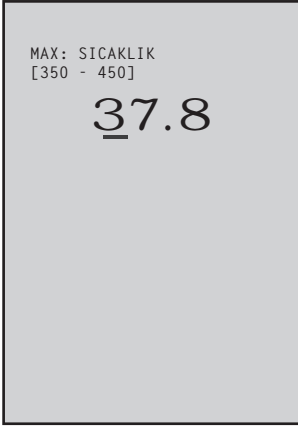

**MAX. SICAKLIK** kısmında, alarm eşiği 35 ila 45 derece aralığında ayarlanır.

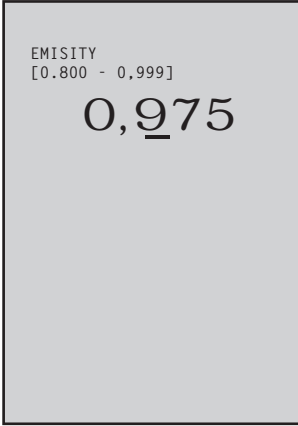

**EMISITY** kısmında, termal sensörün ışık yayılım oranı [0.800 -0.999] arasında ayarlanabilir.



**HIZ (Resim/Saniye)** kısmında, saniyedeki resim görüntüleme hızı ayarlanır. Varsayılan olarak 16 resim/saniyedir.

SES AÇIK/KAPALI  
■ HAYIR  
■ EVET

**SES AÇIK / KAPALI** kısmında algı olduğunda buzzer sesi ayarlanabilir.

HAYIR: Kapalı  
EVET: Açık

ROLE AÇIK/KAPALI  
■ HAYIR  
■ EVET

**RÖLE AÇIK / KAPALI** kısmında algı olduğunda röle çıkışı ayarlanabilir.

HAYIR: Kapalı  
EVET: Açık

SAYAÇLARI SIFIRLA  
■ HAYIR  
■ EVET

**SAYAÇLARI SIFIRLA** kısmında alarm veren kişi sayısını sıfırlar.

HAYIR: İptal  
EVET: Onay



**FABRIKA AYARLARI** kısmında cihaz varsayılan ayara döner.

HAYIR: İptal

EVET: Onay



**ÇIKIS** kısmında '**SEL**' tuşuna basıldığında **ANA MENU**' den çıkar.

